

商品名		3層構造不織布マスク (BFE99%)	
入数 (※内箱のカラー内訳)		100枚/ディスプレイ箱×18箱 = 1,800個/外箱	
品番 (※原産国)		OCS-DM1-007W	MADE IN CHINA
JAN COAD	個装	無し	
	ディスプレイ箱	4562279635919	
	内箱/外箱	無し	無し
OTHER COAD	JP COAD		
本体	材質	本体:不織布(ポリプロピレン)、ワイヤー(ノーズフィット):ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン/ポリエステル	
	サイズ/重量	(約) W175×H95mm 耳ひも除く	(約) 3g ±10%
個包装	入数	1枚	
	材質	OPP	
	サイズ	(約) W217×H100mm	(約) 5g ±10%
座布団	色	無し	
	材質		
	サイズ		
ディスプレイ BOX	入数	100枚	
	材質	紙	
	サイズ/重量	(約) W220×D210×H130mm	(約) 580g ±10%
内箱	入数		
	材質		
	サイズ/重量		
外箱	入数	1,800個 (100枚/ディスプレイ箱×18箱)	
	材質	段ボール	
	サイズ/重量	(約) W690×D430×H425mm ±5mm	(約) 11,840g ±10%

セールスポイント	丸ひも採用で耳が痛くなりにくい!
	ワイヤー付きですれにくい! 鼻にピッタリフィット!
	3段フリース加工があごまでしっかりカバー!
	マルチプロフィルタ内蔵でBFE99%以上
	4か国語啓発デザインパッケージ
△ご注意 △警告 ご使用上の注意	用途以外のご使用はしないでください。
	本品は「有毒ガス」・「有害粉塵」などの発生する場所でのご利用はできません。
	幼児の手の届かない場所に保管してください。
	暖房器具や火気の近くで保管・ご使用はしないでください。
	本品の使用時に眼鏡が曇ることがありますので、運転時などは十分にご注意してください。
	本品において気分が悪くなった場合には、直ちにご使用を中止してください。
	肌に異常がある場合や「かゆみ」・「かぶれ」・「発疹」の症状が現れた場合は、直ちにご使用を中止してください。
	本品は「使い捨てのマスク」ですので、洗濯などによる再利用はできません。
各種検査 その他、特記事項 ご使用方法	①ワイヤー (ノーズフィット) の位置を上向きにして、耳ひもをかけてください。
	②ワイヤー (ノーズフィット) を鼻に合わせて、隙間がなくなる様にしてください。
	③フリースを上下に広げて、鼻からアゴまでを覆ってください。
	④マスクと顔の間の隙間が無くなる様に、全体的に調整してください。