

商品名		3層構造不織布マスク (BFE99%)	
入数 (※内箱のカラー内訳)		34パック/ディスプレイ箱×8箱 = 272パック/外箱	
品番 (※原産国)		OCS-DM3-009W	MADE IN CHINA
JAN COAD	個装	4562279635933	
	ディスプレイ箱		
	内箱/外箱	無し	無し
OTHER COAD	JP COAD		
本体	材質	本体:不織布(ポリプロピレン)、ワイヤー(ノーズフィット):ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン/ポリエステル	
	サイズ/重量	(約) W175×H95mm 耳ひも除く	(約) 3g ±10%
個包装	入数	3枚	
	材質	PE	
	サイズ/重量	(約) W125×D5×H255mm	(約) 15g ±10%
座布団	色	無し	
	材質		
	サイズ		
ディスプレイ BOX	入数	34パック	
	材質	紙	
	サイズ/重量	(約) W260×D260×H120mm ±5mm	(約) 644g ±10%
内箱	入数		
	材質		
	サイズ/重量		
外箱	入数	272パック (34パック×8箱)	
	材質	段ボール	
	サイズ/重量	(約) W550×D550×H275mm ±5mm	(約) 6,500g ±10%

セールスポイント	丸ひも採用で耳が痛くなりにくい!
	ワイヤー付きでずれにくい! 鼻にピッタリフィット!
	3段フリース加工があごまでしっかりカバー!
	マルチプロフィルタ内蔵でBFE99%以上
	4か国語啓発デザインパッケージ
	チャック式抗菌パッケージ
△ご注意 △警告	用途以外のご使用はしないでください。
	本品は「有毒ガス」・「有害粉塵」などの発生する場所でのご利用はできません。
	幼児の手の届かない場所に保管してください。
	暖房器具や火気の近くで保管・ご使用はしないでください。
	本品の使用時に眼鏡が曇ることがありますので、運転時などは十分にご注意してください。
	本品において気分が悪くなった場合には、直ちにご使用を中止してください。
	肌に異常がある場合や「かゆみ」・「かぶれ」・「発疹」の症状が現れた場合は、直ちにご使用を中止してください。
	本品は「使い捨てのマスク」ですので、洗濯などによる再利用はできません。
各種検査 その他、特記事項	①ワイヤー (ノーズフィット) の位置を上向きにして、耳ひもをかけてください。
	②ワイヤー (ノーズフィット) を鼻に合わせて、隙間がなくなる様にしてください。
	③フリースを上下に広げて、鼻からアゴまでを覆ってください。
	④マスクと顔の間の隙間が無くなる様に、全体的に調整してください。
ご使用方法	